

# 1



Ontgrendel het vouwmechanisme middels het rode voetpedaal.

# 2



Klap de scootmobiel uit door het stuur naar voren te kantelen.

# 3



klik

Vergrendel de scootmobiel door de zitting omhoog te trekken en de stuurkolom naar voren te duwen. U hoort dan een klik.



Klap de rugleuning omhoog en de BRIO vouwscoot is klaar om u rond te leiden!



**BRIO**  
vouwscoot

# 1



Klap de rugleuning neer en ontgrendel de scootmobiel middels het rode voetpedaal.

# 2



Klap de scootmobiel in door het stuur naar achteren te kantelen.

# 3



Vergrendel het vouwmechanisme door de stuurkolom naar beneden te duwen. U hoort dan een klik.



Kantel de scootmobiel zodat u de BRIO gemakkelijk als een verrijdbare koffer kunt verplaatsen.



**BRIO**  
vouwscoot